



Rektální
čípky
s kyselinou
hyaluronovou
a propolisem

PŘÍBALOVÝ LETÁK

1. Popis výrobku

Apirectal s kyselinou hyaluronovou a propolisem je zdravotnický prostředek ve formě rektálních čípků.

1 čípek obsahuje: 10 mg kyseliny hyaluronové v podobě sodné soli (*sodium hyaluronate*) a 50 mg propolisu v podobě etanolového extraktu propolisu (*ethanolic extract of propolis*).

Po zavedení čípku do konečníku dochází k jeho rozpouštění, v důsledku toho vzniká gel, který má ochranný a hydratační účinek.

2. Přehled složek

Sodná sůl kyseliny hyaluronové, etanolový extrakt propolisu, polyoxyethylenglykol.

3. Popis účinku

Čípek se po zavedení do konečníku rozpouští a vytváří viskózní hydrogel, který pokrývá sliznice. Kyselina hyaluronová se váže na vlhký sekret sliznic konečníku a vytváří na jejich povrchu gelový povlak. Tato vrstva:

- má hydratační účinek;
- podporuje návrat výstelky konečníku do fyziologického stavu;
- má ochranný účinek a chrání sliznice proti podráždění;
- vytváří podmínky přispívající k aktivaci přirozených regeneračních mechanismů.

4. Určení

Zdravotnický prostředek je určen k:

- obnově přirozeného fyziologického stavu sliznic konečníku u pacientů se zjištěnými vnějšími i vnitřními hemoroidy;
- použití po chirurgických zákrocích v oblasti konečníku.

5. Způsob použití

V závislosti na intenzitě obtíží používejte jeden nebo dva čípky denně.

Čípek zaveďte do konečníku po vyprázdnění, nejlépe na noc.

Čípky používejte 5-10 dní, do doby odeznění obtíží v okolí konečníku. V případě užívání dvou čípků denně: jeden čípek zavádějte dopoledne, druhý na noc.



Vyjmutí čípku z obalu:

- odtrhněte jeden čípek v místě perforace obalu,
- oddělte od sebe obě části fólie a opatrně rozevírejte směrem od sebe,
- vyjměte čípek a ihned jej zaveďte do konečnicku.

Vhodnou polohou pro zavedení čípku je poloha vstoje, v mírném předklonu.

6. Upozornění

U těhotných a kojících žen je nutné použití čípků konzultovat s lékařem.

Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli složku výrobku.

Pokud po použití výrobku dojde ke zhoršení příznaků nebo se objeví vyrážka, otok nebo jiné, dříve nepocitované obtíže v oblasti konečnicku, přerušete jeho používání a vyhledejte lékaře.

Pokud po použití výrobku dojde ke zmírnění nebo ustoupení příznaků, ale po skončení léčby se příznaky objeví znovu, nepoužívejte výrobek opakovaně, ale vyhledejte lékaře.

Nepoužívejte současně s jinými prostředky určenými k rektálnímu použití.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte v případě poškození jakékoli části obalu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

7. Skladování

Výrobek skladujte v originálním obale při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem.

8. Balení

Balení obsahuje 10 čípků.

9. Výrobce

 FARMINA SP. Z O.O.

UL. LIPSKA 44

30-721 KRAKÓW

POLSKO

www.apirectal.com

Datum poslední revize: 08.2020

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

