



Czopki
doodbytnicze
z kwasem
hialuronowym
i propolisem

INSTRUKCJA UŻYWANIA

1. Opis produktu

Apirectal z kwasem hialuronowym i propolisem to wyrób medyczny w postaci czopków doodbytniczych.

1 czopek zawiera: 10 mg kwasu hialuronowego w postaci soli sodowej (*sodium hyaluronate*) oraz 50 mg propolisu w postaci etanolowego ekstraktu propolisu (*ethanolic extract of propolis*).

Po założeniu czopka do odbytu następuje jego rozpuszczenie, w wyniku czego tworzy się żel działający nawilżająco i ochronnie.

2. Wykaz składników

Sól sodowa kwasu hialuronowego, etanolowy ekstrakt propolisu, glikole polioksyetylenowe.

3. Opis działania

Czopek po wprowadzeniu do odbytu rozpuszcza się i tworzy lepki hydrożel, który działa powlekająco na błony śluzowe. Kwas hialuronowy wiąże się z wilgotną wydzieliną błon śluzowych odbytu, tworząc na ich powierzchni żelową powłokę.

Warstwa ta:

- ma działanie nawilżające;
 - wspomaga powrót nabłonka odbytu do stanu fizjologicznego;
 - działa ochronnie, stanowi zabezpieczenie błon śluzowych przed podrażnieniami;
 - tworzy warunki sprzyjające aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych.
-

4. Przeznaczenie

Wyrób medyczny przeznaczony jest do:

- odtworzenia naturalnego stanu fizjologicznego błon śluzowych odbytu u pacjentów ze stwierdzonymi zewnętrznymi i wewnętrznymi hemoroidami;
 - stosowania po zabiegach chirurgicznych w obrębie odbytu.
-

5. Sposób użycia

W zależności od stopnia nasilenia zmian, stosować jeden lub dwa czopki dziennie.

Czopek należy założyć do odbytu po wypróżnieniu, najlepiej na noc.

Czopki stosować przez 5-10 dni, do momentu złagodzenia niekorzystnych dolegliwości w okolicy odbytu. W przypadku stosowania dwóch czopków dziennie, jeden czopek założyć przed południem, drugi na noc.



W celu wyjęcia czopka z folii należy:

- oddzielić jedno gniazdo poprzez przerwanie perforacji,
- rozchylić listki folii i ostrożnie rozwinąć części folii na zewnątrz,
- wyjąć czopek i od razu wprowadzić do odbytu.

Zakładanie czopka najlepiej wykonywać w pozycji stojącej, lekko pochylonej w przód.

6. Ostrzeżenia

U kobiet w ciąży i matek karmiących przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.

Jeśli po zastosowaniu produktu wystąpiło nasilenie zmian lub pojawił się wyprysk, obrzęk bądź inne, nie występujące wcześniej dolegliwości w okolicy odbytu, należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza.

Jeśli po zastosowaniu produktu nastąpi złagodzenie lub ustąpienie zmian, jednak po ukończeniu terapii dolegliwości powrócą, nie należy wznawiać stosowania, lecz zwrócić się do lekarza.

Nie stosować produktu z innymi preparatami podawanymi doodbytniczo.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia którejkolwiek części opakowania.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

7. Przechowywanie

 Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.
Chronić od światła.

8. Opakowanie

Opakowanie zawiera 10 czopków.

9. Wytwórca

 FARMINA SP. Z O.O.
UL. LIPSKA 44
30-721 KRAKÓW
www.farina.pl

Data aktualizacji instrukcji używania: 01.2019

WYRÓB MEDYCZNY

